

抗原检测重要组件

# 前鼻拭子

逗邦® 二类注册采样拭子

强势助力抗原检测

二类医疗器械

注册证


## 产品特点

**采样效果好：**样本采集和释放率高达 95%，无荧光剂，对后续应用无抑制干扰；

**独立灭菌包装：**生物安全性好，无菌提供，包装符合 YY/T0698；

**独特设计：**ABS 杆上折断点设计，易于使用。

## 产品用法

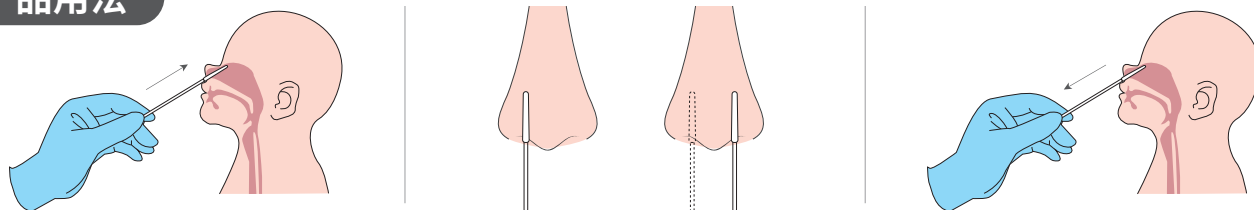

鼻拭子测试 (通常称为前鼻测试) 包括将拭子插入鼻孔约 1-1.5cm 深, 在接触鼻壁两侧的同时在一个鼻孔中旋转 10-15 秒, 然后用相同的棉签, 以相同的方式在另一个鼻孔中收集。

## 订购信息：

| 货号     | 描述                     | 包装        |
|--------|------------------------|-----------|
| SW41   | 逗邦® 一次性使用无菌采样拭子 (前鼻拭子) | 100 支 / 包 |
| SW41-1 | 逗邦® 一次性使用无菌采样拭子 (前鼻拭子) | 100 支 / 包 |

深圳逗点生物技术有限公司  
Biocomma Limited地址：深圳市龙岗区吉华街道甘李六路 12 号中海信创新产业城 12 栋 101-106  
Tel.: 400-878-7248 Web: www.biocomma.cn Email: info@biocomma.com逗点商城  
逗点生物官方直营